

新規受託項目のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では皆様のご要望にお応えし、また医療の進歩に寄与するべく絶えず検査領域の拡大に努めておりますが、このたび、下記項目の検査受託を開始することになりました。
取り急ぎご案内させていただきますので、ご利用のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

新規受託項目

- HPV-DNA 簡易ジェノタイプ 項目コード: 7611
(16 型、18 型、その他ハイリスクグループ)

受託開始日

平成 25 年 10 月 1 日 (火) 受付分より新規受託開始

※ 受託要項等の詳細は、裏面をご参照ください。

保健科学グループ



株式会社 保健科学研究所

本社 / 横浜市保土ヶ谷区神戸町 106 TEL 045-333-1661
仙台支社 / 仙台市宮城野区扇町 1-3-5 TEL 022-236-9345
中部支社 / 名古屋市西区則武新町 2-20-17 TEL 052-582-3201
大阪支社 / 豊中市原田中 1-2-3 TEL 06-6843-5622
福岡支社 / 福岡市博多区山王 2-14-34 TEL 092-452-0851

新潟臨床検査センター

保健科学東日本

日本ノーバメディカル研究所

いかがく

組織科学研究所

ケーアイイー細胞病理研究所

カスタムメディカル研究所

遠州予防医学研究所

日本厚生団衛生科学研究所

湘南医化学検査センター

小田原衛検

相模医研

東部メディカルセンター

新規受託項目

項目コード	検査項目	検体必要量	容器保存方法	検査方法	基準値(単位)	所要日数	実施料判断料	備考
7611	HPV-DNA 簡易ジェノタイプ (16型、18型、その他ハイリスクグループ)	子宮頸部擦過細胞	W3 冷蔵	リアルタイムPCR法	16型 (-) 18型 (-) その他ハイリスクグループ (-)	3 5 6	360 微生物 ※1	※2、3、4

検査場所: 保健科学研究所 第2ラボラトリー(*A)

※1 子宮頸部細胞診の結果、ASC-US(意義不明異型扁平上皮)と判定された患者に対してHPV検査を行った場合に限り、「HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)」を算定できます。

細胞診と同時に実施した場合は算定できません。また、「HPV核酸検出」と併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定できます。

当該検査は、HPV核酸検出の施設基準を届け出ている保険医療機関のみ算定できます。

※2 16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68型および66型のHPVを検出します。

16、18型については、型別判定を行います。その他の型は型別判定はできません。

※3 必ず専用容器で採取してご提出ください。他項目との重複依頼は避けてください。

※4 検体に血液が混入していると、データに影響を及ぼす場合がありますので、ご注意ください。

▼ 臨床的意義


子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス(HPV)中～高リスク型の持続感染で発症するとされています。

本検査では、従来からの検査でも測定可能な中～高リスク型(16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68型)の他に66型も測定対象となり、その中で特にリスクが高く、HPVワクチンの予防対象となっている16型及び18型については個別に型別判定が可能です。

▼ 新容器の取り扱い方法

■ 採取方法

	W3 HPV-DNA簡易ジェノタイプ専用容器
	添加剤・内容物 メタノール 35%含有
	採取量・容量
	貯蔵方法 常温
	有効期限 1年6ヶ月
	検査項目 HPV-DNA 簡易ジェノタイプ(16型、18型、その他ハイリスクグループ)
備考 ブラシの先端は容器に残さないで下さい。	

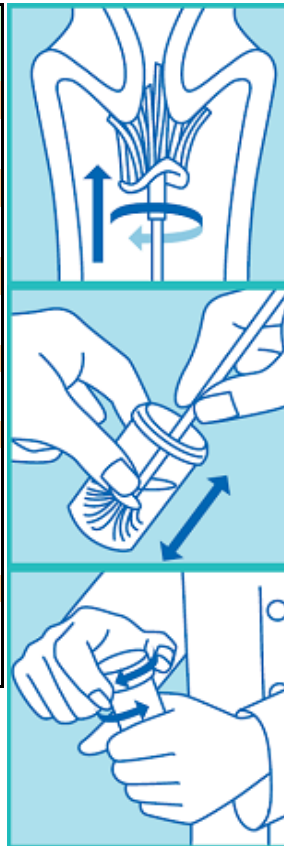

① 綿棒以外の採取器具(ブラシ、スパーテル)を用いて検体を採取します。

② ブラシを容器に入れ、容器の底で毛先が広がるように10回程度押し付けます。さらに、強くかき回して、採取した細胞を洗い落とします。

③ ブラシを取り出して廃棄し、しっかり蓋をして検体を冷蔵保存にて提出して下さい。
(注)ブラシの先端は容器に残さないで下さい。

(注意)

妊婦より検体を採取する場合は安全性を考慮してブラシ等の採取器具の使用は避け、安全性の高い綿棒を使用して下さい。

但し、綿棒では適切な細胞量が採取できないこともあるため取り直しが必要になることもあります。綿棒では無理な力がかかると折れる可能性がありますので十分にご注意下さい。

▼ 参考文献

三浦 俊昭, 他 : 医学と薬学69(1) : 157~162, 2013.